


Starte den Test




1.

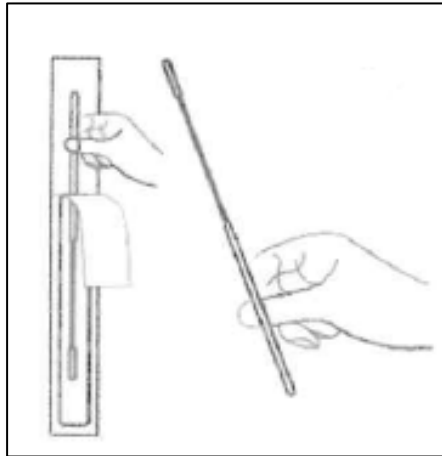

- Öffne die Packung mit dem Tupfer (Wattestäbchen) an der angegebenen Stelle.
- Ziehe den Tupfer Wattestäbchen an seinem Kunststoffende aus der Verpackung.



2.

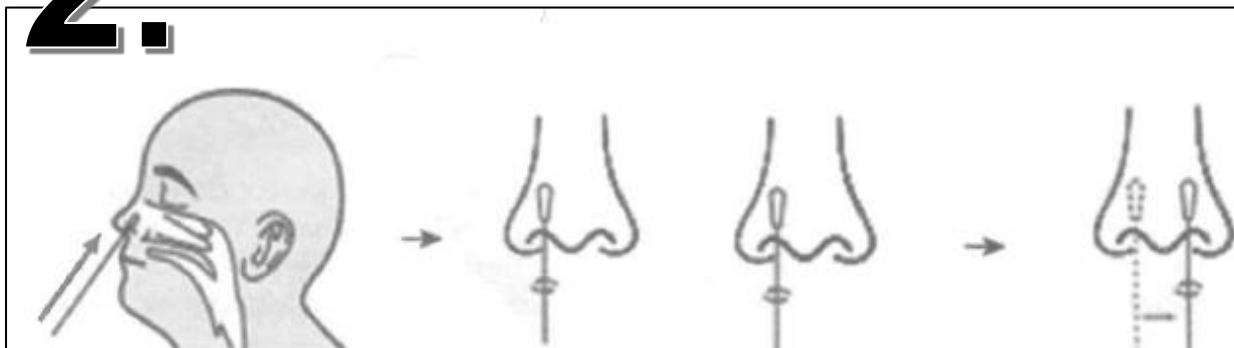


- Führe die saugfähige Spitze des Tupfers vorsichtig in dein linkes Nasenloch ein (ca. 2- 4 cm).
- Ziehe den Tupfer Wattestäbchen an seinem Kunststoffende aus der Verpackung.
- Rolle den Tupfer langsam mindestens **5-mal** gegen die Innenseiten deines Nasenlochs.
- Entferne den Tupfer aus und wiederhole den Vorgang im rechten Nasenloch.

3.





- Führe den Tupfer in das vorbereitete Röhrchen ein.
- Drehe den Tupfer **mindestens 6-mal** und drücke den Kopf des Tupfers gegen den Boden und die Seiten des Röhrchens.

- Lasse den Tupfer **für 1 Minute** im Röhrchen.

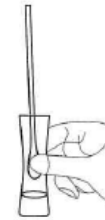


4.

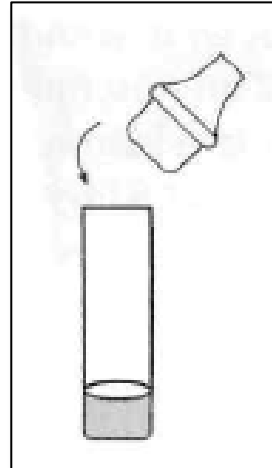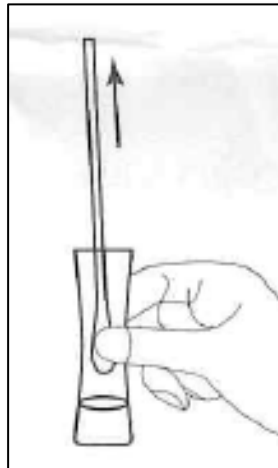

- Entferne den Tupfer und entsorge ihn in den Abfalleimer unter deinem Tisch.
- Stecke die Kappe fest in das Röhrchen.




5.

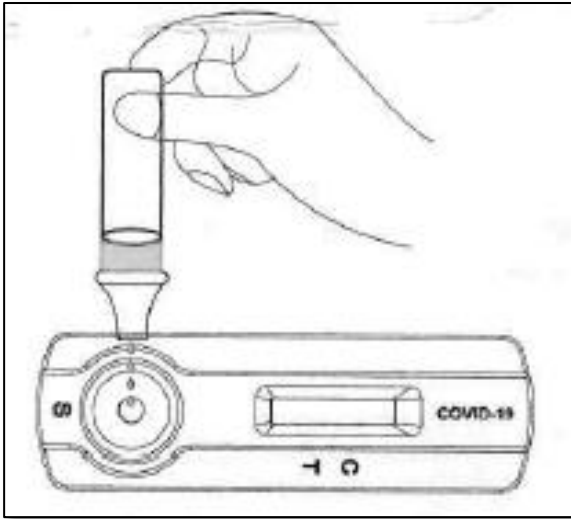

- Nimm die Testkassette aus dem Beutel.
- Gebe **4 Tropfen** der Probelösung in die Probevertiefung der Testkassette.

6.

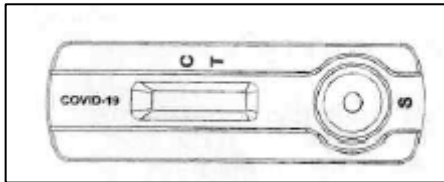

- Werfe das verbrauchte Testmaterial – nicht die **Testkassette**- in den Mülleimer unter deinen Tisch.
- Gib **1. die blaue Schale** und den **Holzwürfel** ab.
- Lege **2. deine Testkassette auf die Liste mit deinem Namen.**
- Nimm dir 3. das **Tagesticket, gehe damit in deinen Klassenraum** und übergebe es deinem Lehrer.



Wichtiger Hinweis!

Das Tagesticket berechtigt dich zur Teilnahme am Unterricht.